

Speichel-Schnelltest

SARS-CoV-2-Antigen-Nachweiskit (kolloidale Goldmethode)



Dieses Produkt ist zum qualitativen Nachweis von Coronavirus-19-Antigen **im Speichel** und anderen Proben geeignet.



Empfindlichkeit: 91,67%
Spezifität: 99,64%
Übereinstimmung ges.: 96,80%

Dieses Test-Kit verwendet die **kolloidale Goldimmunochromatographie** zum Nachweis. Die Probe bewegt sich unter Kapillarwirkung entlang der Testkarte vorwärts. Wenn die Probe ein neues Coronaviren-Antigen enthält, bindet sich der Antikörper an den kolloidalen goldmarkierten monoklonalen Coronavirus-Antikörper.

Benutzeranweisung für den Speichelerkennungsvorgang SARS-Cov-2:

-  1. Öffnen Sie den Deckel des Extraktionsröhrchens
-  2. Schrauben Sie den Speicheltrichter auf
-  3. Husten Sie, um eine Speichelprobe aus dem Hals zu bekommen
-  4. Sammeln Sie 2 ml. Speichel
-  5. Schrauben Sie den Speicheltrichter ab
-  6. Verschliessen Sie das Extraktionsröhrchen und schütteln Sie den Inhalt gut durch
-  7. Saugen Sie eine Probe des Inhalts in die Pipette
-  8. Geben Sie 3 Tropfen in den Probenhalter und warten Sie 20-30 Min. auf das Ergebnis

Verpackungseinheit: 20 Testkits | Kolloidale Goldmethode
Ergebnisse innerhalb von 20 - 30 Minuten | Lagerung bei Raumtemperatur (4-30 °C)



EU-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 98/79 / EG über In-vitro-Diagnostika.